

CONSEILS POUR LES SEMELLES

Conseils pratiques

- Il n'est pas anormal que vous sentez une gêne pendant les premiers jours où vous portez vos semelles. Ceci est causé par la correction apportée par la semelle. Au cas où ces gênes persisteraient après 2 à 3 semaines, il est conseillé de contacter votre orthopédiste pour d'éventuelles modifications.
- Pour d'éventuelles réparations, veuillez aussi contacter votre orthopédiste.

Conseils d'entretien

- Il est très important que vous enleviez chaque soir vos semelles pour qu'elles puissent bien s'aérer. Au cas où vos semelles commenceraient à avoir une certaine odeur persistante, vous pouvez les emballer dans un sachet et les placer dans un congélateur pendant 24 heures. De cette façon les bactéries qui causent l'odeur mourront et l'odeur disparaîtra.
- Les semelles en cuir peuvent être entretenues régulièrement en appliquant une crème incolore ou une crème pour cuir. Ceci prolongera de façon significative la durée de vie de vos semelles.
- Les semelles en matière synthétique peuvent être entretenues par un tissu humide et un détergent.
- Les semelles en plastique ne nécessitent pas d'entretien.
- Attention! Ne laissez pas sécher vos semelles au dessus d'une source de chaleur.

Période de renouvellement

DES SEMELLES	
-18 ans	1 an
+18 ans	2 ans

